


Soins quotidiens de votre prothèse phonatoire - Provox Brush[®]

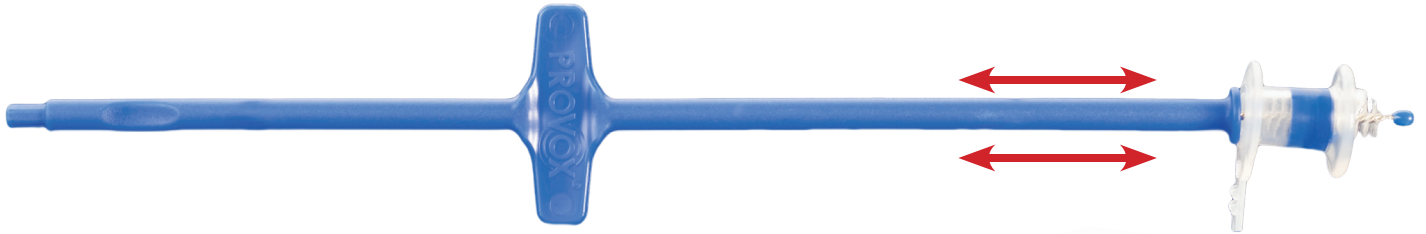

Nettoyez la prothèse phonatoire matin et soir et après chaque repas à l'aide de la brosse Provox Brush et de la poire de rinçage Provox Flush.

- Humidifiez les poils de la brosse Provox Brush, puis insérez la dans la prothèse phonatoire. Retirez la brosse si vous sentez une résistance.
- Déplacez la brosse d'avant en arrière tout en la faisant tourner en même temps, cela nettoiera toute la prothèse.
- Lorsque vous avez terminé:
 - Nettoyez la brosse avec de l'eau potable et des détergents conformément au mode d'emploi de la brosse Provox Brush.
 - Rincez à l'eau du robinet et la conserver dans un endroit sec.
- Remplacez la brosse une fois par mois ou plus tôt, si les poils semblent usés.

Astuce: Si nécessaire, la tige bleue de la brosse peut être pliée pour un meilleur accès à la prothèse phonatoire. Ne pas plier la partie en fil de fer de la brosse. Ne pas tourner la brosse pendant le nettoyage lorsque la tige est pliée.

Astuce: Si votre prothèse est de longueur 12,5 mm ou plus, utilisez la brosse Provox Brush XL. Pour les prothèses plus courtes, utilisez la brosse standard.

- Désinfectez la brosse quotidiennement en conformité avec le mode d'emploi de la brosse Provox Brush.

